

Инструкция по применению держателя пина BT-HD

1. Держатель пина BT-HD должен храниться всегда с надетым защитным колпачком (кроме случаев непосредственного использования, чистки, замачивания, промывки, просушки). Автоклавируется в защитном колпачке.
2. Извлекать пин из кассеты держателем перпендикулярно шляпке пина нажатием до упора в стенку кассеты (в кассете имеются выемки для плотной фиксации пина на держателе).
3. Вводить пин в кость под прямым углом к ее поверхности одним ударом молотка по держателю (сила удара зависит от плотности кости). Если приходится вводить косо, удар должен быть выверен, без излишней силы, чтобы не сломать усик цанги.
4. В рыхлой кости (D2-D4) отделять держатель от пина с помощью тонкого скальпеля или зонда, введенных в щель между лепестками цанги для блокировки пина в кости (жесткая фиксация пина в держателе не брак, а забота о безопасности).
5. В очень рыхлой кости (D4) пины применять с осторожностью (см. п. 4). В этих случаях возможна альтернатива - винты с широкой шляпкой (14-AT-003G, 14-AT-004G или 14-AT-005G)